



URIT Medical

## INSTRUCCIONES OPERACIÓN DILUENTE 5D 11

**【Nombre】** Diluyente

**【Modelo】** URIT 5D 11

**【Especificaciones】** Referirse a la caja o a la etiqueta.

**【Uso determinado】** Este producto se usa en el analizador automatizado de hematología de diferencial de 5-Partes junto con el reactivo Lítico y el Sheath Producido por URIT, para hacer conteo de células en muestras de sangre humana.

**【Funciones】** El Diluyente es una solución buffer para diluir las células y prevenir su aglomeración. Su concentración osmótica, fuerza iónica y conductividad ayudan a preservar la integridad y el volumen de las células.

**【Ingredientes】** : Sulfato de sodio anhidro-----5~15 g/L

Solución preservativa -----< 20 g/L

Muriato-----2~6 g/L

Ecetato disódico-----< 0.5g/L

Solución Buffer -----< 1 g/L

**【Almacenamiento y estabilidad】** Este producto es estable por 24 meses cuando se almacena sin abrir de 2° c ~40 ° c alejado de la luz solar . Una vez abierto el producto se debe consumir en 60 días almacenado a 35 ° c. .

### **【Muestras de Sangre】**

1. Las muestras de sangre deben ser venosas o capilares tomadas con anticoagulante EDTA-K2 . Muestras coaguladas, hemolizadas o lipemicas no pueden ser analizadas.
2. Las muestras de sangre se pueden almacenar de 2 ° c ~8 ° c.

### **【Instrucciones】**

1. Colocar el contenedor del diluyente abajo del analizador evitando la luz solar directa.. Evitar congelamiento o salidas de aire acondicionado..
2. Usarlo a 15 ° c ~30 ° c.
3. Conectar el recipiente de acuerdo al manual de operación..

**【Resultados del test】** Si los resultados están por fuera de los rangos de los valores de referencia, los resultados estarán marcados con una alarma “L” por debajo del límite inferior o “H”, por encima del límite superior.

### **【Restricciones, Precauciones】**

1. Usar el reactivo bajo la supervisión de un técnico entrenado.
2. Revisar que los reactivos concuerden con el analizador. Cualquier incompatibilidad puede ocasionar errores en los resultados.
3. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y buscar ayuda médica.
4. Evitar inhalar producto evaporado.
5. Cerrar la tapa firmemente para evitar evaporación y contaminación.
6. Una vez abierto disponer el remanente pasados 60 días.
7. Si el producto se ha congelado, dejar a temperatura ambiente y luego mezclar suavemente. Revisar los resultados del conteo de fondo antes de usar.

**【 Símbolos de la caja y la etiqueta 】**



Usado por



Lote No.




No re usar



Proteger de la

luz solar

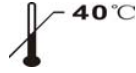

Límite máximo de temperatura



Consultar las

instrucciones de uso



Para uso diagnóstico In Vitro



Fabricante



Representante Autorizado por la comunidad Europea



**URIT Medical Electronic Co., Ltd** Supplied by:

No.4 East Alley, Jiuhua Road, Guilin, Guangxi 541001, PR China **URIT Medical Electronic Co., Ltd**

Tel: +86(773)2288586 Fax: +86(773)2288560

Web: [www.urit.com](http://www.urit.com) Email: [service@uritest.com](mailto:service@uritest.com)

Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting



Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9GR, UK

