

INSTRUCCIONES OPERACIÓN DETERGENTE URIT D

【Nombre】 Detergente

【Modelo】 URIT D 46

【Especificaciones】 Referirse a la caja o a la etiqueta.

【Uso determinado】 El detergente se usa en el analizador para el mantenimiento diario y la limpieza del sistema de flujo y de la aguja.

【Funciones】 Con las funciones de emulsión y lisis, el detergente puede emulsionar la grasa, distribuir la suciedad sólida y transformar las proteínas en amino ácidos solubles en agua para mantener la limpieza de las mangueras y el sistema de flujo. Con humedad efectiva también puede eliminar las burbujas del sistema de flujo y asegurar el funcionamiento normal del sistema. Además el detergente no colorea, no contamina las mangueras y alarga la vida media del instrumento.

【Ingredientes】

Solución preservativa-----	<20 g/L
Sulfato de Cloro-----	<20 g/L
Solución Buffer-----	<1 g/L
Anticoagulante-----	1~2 g/L
Surfactante-----	<0.3 g/L

【Almacenamiento y estabilidad】 Este producto es estable por 24 meses cuando se almacena sin abrir de 2° c ~40 ° c alejado de la luz solar . Una vez abierto el producto se debe consumir en 60 días almacenado a 35 ° c.

【Instrucciones】

1. Colocar el detergente abajo del analizador evitando la luz solar directa.. Evitar congelamiento o salidas de aire acondicionado.
2. Usarlo a 15 ° c ~30 ° c.
3. Conectar el recipiente de acuerdo al manual de operación.

【Restricciones, Precauciones】

1. Usar el reactivo bajo la supervisión de un técnico entrenado.
2. Revisar que los reactivos concuerden con el analizador. Cualquier incompatibilidad puede ocasionar errores en los resultados.
3. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y buscar ayuda médica.
4. Evitar inhalar producto evaporado.
5. Cerrar la tapa firmemente para evitar evaporación y contaminación.
6. Una vez abierto disponer el remanente pasados 60 días.
7. Si el producto se ha congelado, dejar a temperatura ambiente y luego mezclar suavemente. Revisar los resultados del conteo de fondo antes de usar.

【Símbolos de la caja y la etiqueta】



Usado por



Lote No.




No re usar



Proteger de la

luz solar

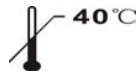

Límite máximo de temperatura



Consultar las

instrucciones de uso



Para uso diagnóstico In Vitro



Fabricante



Representante Autorizado por la comunidad Europea



URIT Medical Electronic Co., Ltd Supplied by:

No.4 East Alley, Jiuhua Road, Guilin, Guangxi 541001, PR China **URIT Medical Electronic Co., Ltd**

Tel: +86(773)2288586 Fax: +86(773)2288560

Web: www.urit.com Email: service@uritest.com

Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting



Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9GR, UK

